



Therapeuten-WebApp


Schulung

Dietmar Bothe
Konfigurieren einer Übung

„Schritt für Schritt“



Die Lizenz des Patienten ist eingetragen, wir wollen eine Übung anlegen“Schritt für Schritt“.

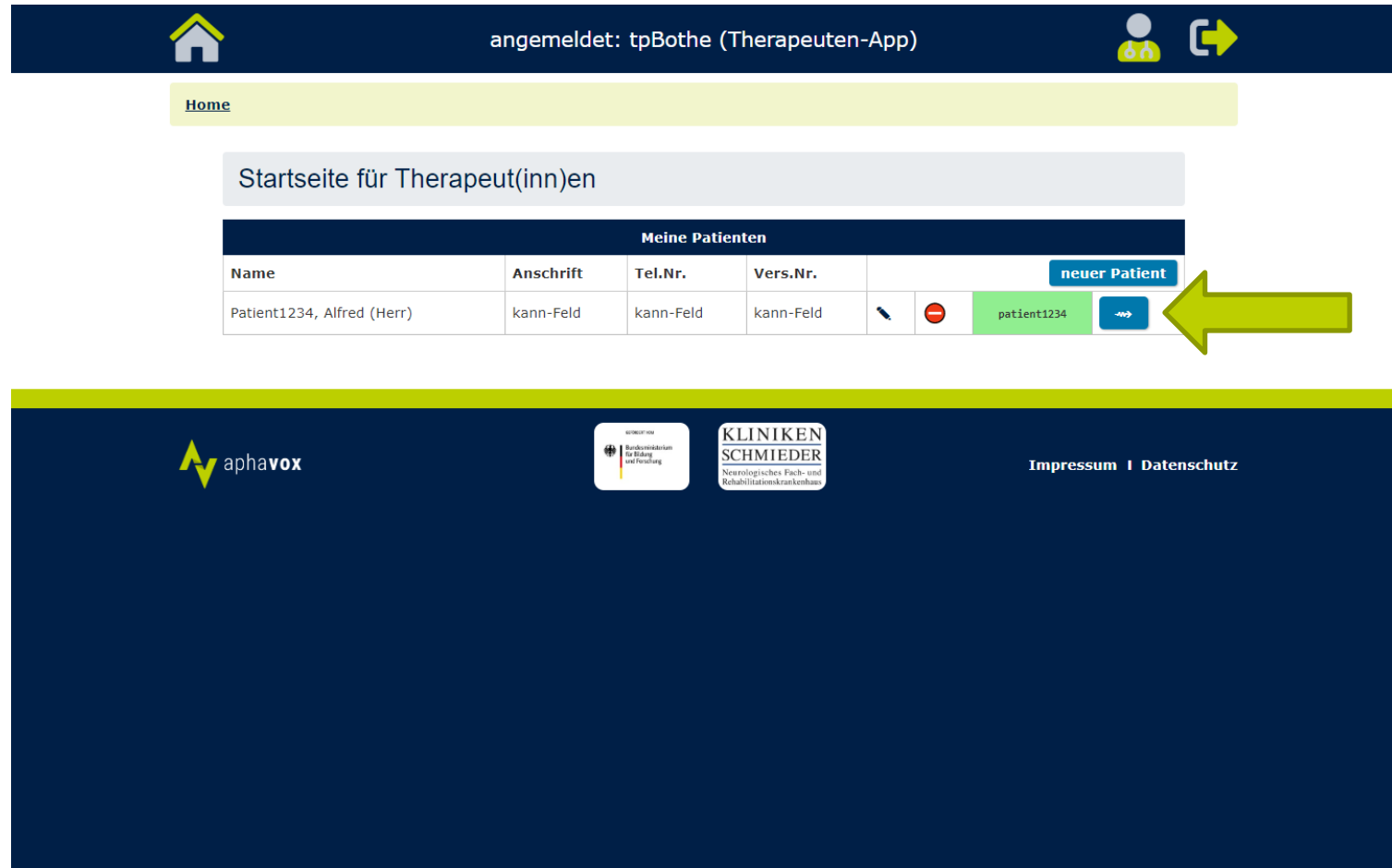

The screenshot shows the 'Therapeuten-App' interface. At the top, a dark blue header contains a home icon, the text 'angemeldet: tpBothe (Therapeuten-App)', and user profile icons. Below the header is a yellow bar with the text 'Home'. The main content area is titled 'Startseite für Therapeut(inn)en' and features a table titled 'Meine Patienten'. The table has columns for 'Name', 'Anschrift', 'Tel.Nr.', and 'Vers.Nr.'. A row is visible for 'Patient1234, Alfred (Herr)' with 'kann-Feld' in the address and phone number columns. To the right of the table is a 'neuer Patient' button and a row of action buttons: a pencil icon, a red stop sign, a green button labeled 'patient1234', and a blue double-headed arrow button. A large yellow arrow points to the double-headed arrow button. At the bottom of the app, there is a dark blue footer with the 'aphavox' logo, logos for 'Bundesministerium für Bildung und Forschung' and 'KLINIKEN SCHMIEDER Neurologisches Fach- und Rehabilitationskrankenhaus', and links for 'Impressum | Datenschutz'.

Name	Anschrift	Tel.Nr.	Vers.Nr.				
Patient1234, Alfred (Herr)	kann-Feld	kann-Feld	kann-Feld			patient1234	



Individuelle Übung: „Schritt für Schritt“

angemeldet: tpBothe (Therapeuten-AppXL)

Home > Trainingsprogramme

Trainingsprogramme verwalten

Trainingsprogramme für Patient Christoph patient12456

Name	Items	Funktionen
Keine Trainingsprogramme konfiguriert. Seien Sie der erste, der Christoph patient12456 ein Training gestaltet!		

Neues Trainingsprogramm

[Schritt für Schritt](#)

[aus Templates auswählen](#)

aphaVOX

KLINIKEN SCHMIEDER

Impressum | Datenschutz

Konfiguration Teil 1:

angemeldet: tpBothe (Therapeuten-AppXL)

Home > Trainingsprogramme

neues Trainingsprogramm für Patient Christoph patient12456


Name für dieses Trainingsprogramm*

Individuelle Übung für Christoph

Vanishing Cues abnehmende Hilfen		Reihenfolge	Konfrontatives Benennen ansteigende Hilfen		Reihenfolge
<input checked="" type="checkbox"/>	auditiv & schriftlich (Bildauswahl)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Wiederholen ohne Hilfe	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	nur auditiv (Bildauswahl)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Semantische Hilfe	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Nachsprechen	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Satzergänzung	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	Anlaut	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Wortergänzung (nur bei Simplizia)	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	Wortergänzung (nur bei Simplizia)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Anlaut	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Satzergänzung	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Schriftvorgabe	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Benennen	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nachsprechen	<input type="text"/>
Verwendung Ablenker			Aktivierung der Hilfestellungen		
<input checked="" type="checkbox"/>	semantisch		<input checked="" type="radio"/>	automatisch	
<input checked="" type="checkbox"/>	phonematisch		<input type="radio"/>	Patientenwahl	
<input type="checkbox"/>	ohne Bezug				

Speichern


Name der Übung

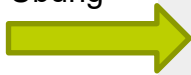

Hilfen auswählen



Hilfen auswählen

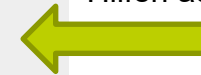

Ablenker auswählen



automatisch/manuell?



Speichern, wenn fertig!



Nach Speichern:

angemeldet: tpBothe (Therapeuten-AppXL)

Home > Trainingsprogramme

Daten gespeichert! Konfigurieren Sie weiter!

Trainingsprogramm bearbeiten

Name für dieses Trainingsprogramm*

Individuelle Übung für Christoph

I. Übungsformen

Automatische Auswahl von Vanishing Cues

Hier umstellen

Vanishing Cues		Konfrontatives Benennen	
abnehmende Hilfen	Reihenfolge	ansteigende Hilfen	Reihenfolge
<input checked="" type="checkbox"/> auditiv & schriftlich (Bildauswahl)	<input type="text" value="1"/>	<input type="checkbox"/> Wiederholen ohne Hilfe	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> nur auditiv (Bildauswahl)	<input type="text" value="2"/>	<input type="checkbox"/> Semantische Hilfe	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Nachsprechen	<input type="text" value="3"/>	<input type="checkbox"/> Satzergänzung	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Anlaut	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Wortergänzung (nur bei Simplizia)	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Wortergänzung (nur bei Simplizia)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Anlaut	<input type="text"/>



Konfiguration Teil 2: (erscheint automatisch nach Speichern Teil 1)

<input checked="" type="checkbox"/> Benennen <input type="text" value="5"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Nachsprechen <input type="text" value="2"/>
Verwendung Ablenker	Aktivierung der Hilfestellungen
<input checked="" type="checkbox"/> semantisch <input checked="" type="checkbox"/> phonematisch <input type="checkbox"/> ohne Bezug	<input checked="" type="radio"/> automatisch <input type="radio"/> Patientenwahl

II. Übungsumfang und -verlauf

Anzahl Übungen (0 für unbegrenzt)	Morphologie	Ablauf
<input type="text" value="16"/>	<input type="checkbox"/> Simplizia <input type="checkbox"/> Komposita <input type="checkbox"/> 1 Silbe <input type="checkbox"/> 2 Silben <input type="checkbox"/> 2 Silben <input type="checkbox"/> 3+ Silben <input type="checkbox"/> 3+ Silben	Nächste Aufgabe <input type="radio"/> automatisch <input checked="" type="radio"/> per Hand
Maximale Übungsdauer (Minuten, 0 für unbegrenzt)		
<input type="text" value="15"/>		

III. Übungswortschatz (Themengebiete)

Themengebiete/Bilder



- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Arbeitswelt | <input type="checkbox"/> Körper/Menschen/Personen | <input type="checkbox"/> Kleidung/Textil |
| <input type="checkbox"/> Bauwerke/Gebäude | <input type="checkbox"/> Kultur | <input type="checkbox"/> Geld/Finanzen |
| <input type="checkbox"/> Freizeit | <input type="checkbox"/> Lebensmittel/Essen/Getränke | <input type="checkbox"/> Test-Übungsitems |
| <input type="checkbox"/> Geräte/Werkzeuge/Waffen | <input type="checkbox"/> Natur | <i>(Leerlassen für alle)</i> |
| <input type="checkbox"/> Haus/Haushalt | <input type="checkbox"/> Tiere | |
| <input type="checkbox"/> Kommunikation/Medien | <input type="checkbox"/> Verkehr | |

Änderungen speichern



Konfiguration beendet, jetzt Trainingsitems zuordnen

Daten gespeichert!

Trainingsprogramme verwalten

Trainingsprogramme für Patient Christoph patient12456

Name	Items	Funktionen
 Individuelle Übung für Christoph (ID: 10206, VC)	Bo	Konfigurieren Trainingsitems zuordnen Löschen

Kein aktives Trainingsprogramme definiert.

Neues Trainingsprogramm

[Schritt für Schritt](#)

[aus Templates auswählen](#)



Trainingsitems auswählen




angemeldet: tpBothe (Therapeuten-AppXL)

Home > Trainingsprogramme

Trainingsprogramm bearbeiten: Items

Programm: Individuelle Übung für Christoph
für Patient: 98
Kriterien der Itemsauswahl (Themengebiete): alle
Kriterien der Itemsauswahl (Wortmorphologie): Simplizia, 1 Silbe, 2 Silben, 3+ Silben, Komposita, 2 Silben, 3+ Silben
Kriterien der Itemsauswahl (maximale Anzahl Items): 16 (informativ!)

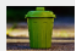481 verfügbare Trainingsitems

Trainingsitem-Name	Zielwort		<i>in diesem Trainingsprogramm</i>
Abfalleimer	Abfalleimer		<input checked="" type="checkbox"/> wird genutzt auf Position <input type="text"/>
Adler	Adler		<input checked="" type="checkbox"/> wird genutzt auf Position <input type="text"/>
Affe	Affe		<input type="checkbox"/> wird genutzt auf Position <input type="text"/>

Nach Auswahl: speichern (am Ende der Liste)



Trainingsprogramm für Patient „Christoph“ aktivieren:

The screenshot shows a web application interface. At the top, a dark blue header contains a home icon, the text 'angemeldet: tpBothe (Therapeuten-AppXL)', and user profile and navigation icons. Below the header is a light green breadcrumb trail: 'Home > Trainingsprogramme'. A green notification bar reads 'Daten gespeichert!'. The main content area is titled 'Trainingsprogramme verwalten' and 'Trainingsprogramme für Patient Christoph patient12456'. A table lists training items with columns for 'Name', 'Items', and 'Funktionen'. The first row shows 'Individuelle Übung für Christoph (ID: 10207, VC)' with a checkbox, a profile picture, and a blue ball icon. To the right are buttons for 'Konfigurieren', 'Trainingsitems zuordnen', and 'Löschen'. A red message at the bottom of the table states 'Kein aktives Trainingsprogramme definiert.'.

Home > Trainingsprogramme

Daten gespeichert!

Trainingsprogramme verwalten

Trainingsprogramme für Patient Christoph patient12456

Name	Items	Funktionen
<input type="checkbox"/> Individuelle Übung für Christoph (ID: 10207, VC)	 	Konfigurieren Trainingsitems zuordnen Löschen

Kein aktives Trainingsprogramme definiert.

Anklicken



Patient „Christoph“ kann jetzt trainieren!

